

INSTRUKCJA UŻYWANIA

ORMIGO MOVA

Balkonik wielofunkcyjny z ławeczką i zestawem toaletowym

Marka: ORMIGO

MD wyrób medyczny	CE oznakowanie CE	4 funkcje balkonik / ławeczka / toaleta / prysznic
4 nogi regulacja wysokości	Składany łatwiejsze przechowywanie	Zestaw WC pojemnik + pokrywa



Składana rama | Regulowane nogi | Funkcja balkonika | Ławeczka | Zestaw toaletowy

Data wydania instrukcji: 05.2026

1. Wykonanie i elementy produktu

ORMIGO MOVA to wielofunkcyjny balkonik z możliwością zastosowania jako podpórka do chodzenia, ławeczka, krzesło toaletowe oraz krzesło prysznicowe. Konstrukcja jest składana, a cztery nogi posiadają regulację wysokości oraz nasadki antypoślizgowe.

W zależności od potrzeb użytkownika można wykorzystać samą ramę balkonika albo zamontować ławeczkę lub zestaw toaletowy z pojemnikiem sanitarnym i pokrywą.



Nr	Element
1	Uchwyty / strefa chwytu
2	Górna rama i element składania
3	Oparcie / pas stabilizujący
4	Siedzisko lub zestaw toaletowy
5	Pojemnik sanitarny
6	Regulacja wysokości nóg
7	Nasadki antypoślizgowe
8	Boczna część ramy i punkt podparcia

2. Przeznaczenie

MOVA jest pomocniczym wyrobem wspierającym mobilność i codzienną opiekę osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Produkt może być wykorzystywany w warunkach domowych i opiekuńczych, w szczególności podczas wstawania, chodzenia, siadania oraz czynności higienicznych.

- wspomaganie chodzenia i zachowania stabilności,

-
- pomoc przy zmianie pozycji i wstawaniu,
 - krótkotrwały odpoczynek na ławeczce,
 - funkcja krzesła toaletowego po zamontowaniu zestawu sanitarnego,
 - funkcja krzesła prysznicowego zgodnie z przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa.

3. Elementy zestawu i konfiguracje

Zestaw MOVA pozwala przygotować wyrób do kilku zastosowań. Konfigurację należy dobrać do bieżącej potrzeby użytkownika, dbając o prawidłowe zamocowanie wybranych elementów.



Rama balkonika



Ławeczka



Zestaw toaletowy

Konfiguracja	Zastosowanie
Balkonik	Wsparcie podczas chodzenia i stabilizacji pozycji.
Ławeczka	Siedzisko do krótkotrwałego odpoczynku lub czynności higienicznych.
Zestaw toaletowy	Siedzisko sanitarne z pojemnikiem i pokrywą.
Krzesło prysznicowe	Użytkowanie w warunkach wilgotnych zgodnie z instrukcją; po użyciu wyrób należy osuszyć.

4. Montaż, składanie i regulacja wysokości

- Rozłożyć ramę produktu i upewnić się, że elementy konstrukcyjne zostały prawidłowo ustawione.
- W zależności od potrzeby zamontować ławeczkę albo zestaw toaletowy.
- W przypadku używania funkcji toaletowej umieścić pojemnik sanitarny we właściwym miejscu i przygotować pokrywę.
- Wyregulować wysokość wszystkich czterech nóg na jednakowy poziom.
- Po regulacji sprawdzić, czy blokady zostały prawidłowo zatrzaśnięte.
- Przed użyciem zawsze sprawdzić stabilność produktu.

Uwaga: Nogi muszą być ustawione na tej samej wysokości. Nierówne ustawienie może pogorszyć stabilność produktu.

5. Sposób użytkowania

- Ustawić MOVA na stabilnym, równym podłożu.
- Chwytać produkt oburącz w miejscach do tego przeznaczonych.
- Podczas chodzenia zachować ostrożność i unikać mokrych, śliskich lub bardzo nierównych powierzchni.
- Przed siadaniem upewnić się, że zamontowana ławeczka lub zestaw toaletowy są prawidłowo osadzone.
- W funkcji toaletowej po zakończeniu użycia opróżnić i umyć pojemnik sanitarny.
- Po użyciu w warunkach wilgotnych osuszyć produkt przed przechowywaniem.

6. Czynności przed każdym użyciem i zasady bezpieczeństwa

- Sprawdzić, czy rama nie jest pęknięta, odkształcona ani poluzowana.
- Sprawdzić, czy wszystkie cztery nogi są ustawione na jednakowej wysokości.
- Upewnić się, że elementy blokujące regulację są prawidłowo zatrzaśnięte.
- Skontrolować stan nasadek antypoślizgowych; zużyte nasadki należy wymienić.
- Sprawdzić prawidłowe zamocowanie ławeczki lub zestawu toaletowego.
- Nie używać produktu jako drabinki, stopnia ani urządzenia do przewożenia użytkownika.
- Nie korzystać z produktu w przypadku widocznych uszkodzeń lub braku stabilności.
- Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji konstrukcyjnych.

Ważne: Przed pierwszym użyciem zaleca się dopasowanie wysokości produktu do użytkownika i zapoznanie się z pełną instrukcją.

7. Przeciwwskazania i ostrożność

Przed użyciem należy rozważyć, czy stan użytkownika pozwala na bezpieczne korzystanie z produktu. Szczególnej ostrożności wymagają osoby z istotnymi zaburzeniami równowagi, koordynacji, niestabilnością kręgosłupa lub dysfunkcjami kończyn uniemożliwiającymi bezpieczne podpieranie się.

8. Czyszczenie, dezynfekcja i konserwacja

- Ramę oraz elementy chwytne czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką.
- Stosować łagodne środki myjące odpowiednie do powierzchni sprzętu medycznego.
- Pojemnik sanitarny opróżniać, myć i dezynfekować po każdym użyciu.
- Ławeczkę i elementy zestawu toaletowego utrzymywać w czystości.
- Nie stosować rozpuszczalników, wybielaczy, benzyny ani środków ściernych.
- Po czyszczeniu i po użyciu pod prysznicem dokładnie osuszyć produkt.
- Regularnie kontrolować stan nóg, blokad, elementów składania i nasadek antypoślizgowych.

9. Przechowywanie i transport

Produkt należy przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od nadmiernej wilgoci, wysokiej temperatury i bezpośredniego działania promieni słonecznych. Podczas transportu MOVA powinna być zabezpieczona przed przesuwaniem i uderzeniami.

10. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Nazwa produktu	ORMIGO MOVA
Typ produktu	Balkonik wielofunkcyjny z ławeczką i zestawem toaletowym
Funkcje	Balkonik, podpórka, ławeczka, krzesło toaletowe, krzesło prysznicowe
Konstrukcja	Składana rama z regulowanymi nogami
Regulacja nóg	Tak, 4 nogi regulowane
Nasadki nóg	Antypoślizgowe
Ławeczka	Tak
Zestaw toaletowy	Tak, z pojemnikiem sanitarnym i pokrywą
Maksymalne obciążenie	Do potwierdzenia zgodnie z etykietą / kartą techniczną produktu

11. Uwagi, gwarancja i zgłaszanie incydentów

ORMIGO Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, samodzielnych przeróbek lub korzystania z uszkodzonego produktu.

Jeżeli użytkownik odczuwa nieoczekiwane dolegliwości, pogorszenie samopoczucia lub trudności z bezpiecznym korzystaniem z wyrobu, należy przerwać użytkowanie i skonsultować się z lekarzem, fizjoterapeutą lub opiekunem.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent ma miejsce zamieszkania.

Produkt objęty jest gwarancją zgodnie z kartą gwarancyjną lub dokumentem sprzedaży. Do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu.

12. Informacja o wyrobie medycznym

Informacja	Dane
Wyrób medyczny	Tak
Oznakowanie	CE
Przeznaczenie	Wsparcie mobilności, siadania, wstawania oraz czynności higienicznych

13. Dane producenta i podmiotu prowadzącego reklamę

Podmiot	Dane
Producent	ORMIGO Sp. z o.o. 68-200 Żary, ul. Broni Pancernej 16, Poland www.ormigo.com.pl e-mail: zamowienia@ormigo.com.pl
Podmiot prowadzący reklamę	ORMIGO Sp. z o.o. 68-200 Żary, ul. Broni Pancernej 16, Poland www.ormigo.com.pl e-mail: zamowienia@ormigo.com.pl

MD CE

14. Oznaczenia

Na etykiecie, opakowaniu lub w dokumentacji wyrobu mogą występować poniższe symbole i oznaczenia.

LOT	Numer partii	i	Zapoznaj się z instrukcją
IMP	Importer	EC REP	Upoważniony przedstawiciel
	Producent	MD	Wyrób medyczny
CE	Producent dokonał oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych		Data produkcji
kg	Maksymalne obciążenie	UDI	Kod UDI

REF: MOVA | Wydanie: 1.0 | Data: 05.2026