

INSTRUKCJA UŻYWANIA

ORMIGO NEXA COMFORT

Balkonik rehabilitacyjny czterokołowy z siedziskiem, koszykiem i podpórką na nogi

Marka: ORMIGO

MD wyrób medyczny	CE oznakowanie CE	ALU lekka rama
75 kg maks. obciążenie	6" koła PVC	ok. 7,3 kg waga netto



Lekka rama aluminiowa | Regulowane uchwyty | Hamulce | Siedzisko | Koszyk | Podpórka na nogi

Data wydania instrukcji: 05.2026

1. Wykonanie i elementy balkonika

Balkonik NEXA Comfort wykonany jest z lekkiej aluminiowej ramy i jest przeznaczony do wspierania użytkownika podczas chodzenia. Produkt wyposażono w cztery koła, regulowane uchwyty, hamulce przy rączkach, siedzisko, koszyk na drobne przedmioty oraz podpórkę / podnózek na nogi.



Nr	Element
1	Uchwyty / rączki prowadzące
2	Hamulce przy rączkach
3	Oparcie
4	Siedzisko
5	Koszyk na drobne przedmioty
6	Koła przednie / tylne 6" PVC
7	Podpórka / podnózek na nogi
8	Regulacja wysokości uchwytów
9	Przednia podpórka / element stabilizujący

Zestaw obejmuje balkonik z kołami, siedzisko, koszyk oraz elementy użytkowe zgodne z konfiguracją produktu. Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że wszystkie elementy zostały prawidłowo zamontowane i zabezpieczone.

2. Przeznaczenie

Balkonik rehabilitacyjny czterokołowy NEXA Comfort jest pomocniczym wyrobem wspierającym mobilność osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Produkt przeznaczony jest do wspomagania chodu, poprawy stabilności oraz zwiększenia bezpieczeństwa podczas codziennego poruszania się.

Balkonik może być używany wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz, na stabilnym i równym podłożu. Siedzisko służy do krótkiego odpoczynku po zatrzymaniu balkonika. Podpórka na nogi zwiększa komfort użytkownika podczas odpoczynku w pozycji siedzącej.

- dla osób starszych i osłabionych, które potrzebują wsparcia przy chodzeniu,

- dla osób w trakcie rehabilitacji lub rekonwalescencji,
- dla użytkowników mających trudności z utrzymaniem równowagi,
- do codziennego przemieszczania się w domu, placówkach opiekuńczych oraz na równym terenie zewnętrznym.

3. Wskazania i przeciwwskazania

Wskazania:

- ograniczona sprawność ruchowa, osłabienie mięśniowe lub potrzeba dodatkowego podparcia,
- rehabilitacja po urazach, zabiegach lub okresie unieruchomienia,
- trudności z samodzielnym, bezpiecznym poruszaniem się bez pomocy.

Przeciwwskazania i sytuacje wymagające szczególnej ostrożności:

- brak możliwości utrzymania pozycji stojącej lub siedzącej bez nadzoru,
- znaczne zaburzenia równowagi, dezorientacja lub stan uniemożliwiający bezpieczne korzystanie z balkonika,
- uszkodzenie ramy, kół, uchwytów, hamulców lub elementów blokujących,
- użytkowanie na śliskim, grząskim, stromym lub bardzo nierównym podłożu.

4. Przygotowanie do użycia

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić kompletność zestawu oraz stan techniczny wyrobu. Wszystkie elementy powinny być stabilne, dokręcone i wolne od widocznych uszkodzeń.

Krok 1. Rozłożenie i ustawienie balkonika

Ustawić balkonik na stabilnym, równym podłożu. Upewnić się, że rama jest poprawnie rozłożona, a wszystkie elementy blokujące znajdują się w prawidłowej pozycji.

Krok 2. Regulacja wysokości uchwytów

Wysokość ręczek należy dopasować do wzrostu użytkownika. Podczas stania sylwetka powinna być możliwie wyprostowana, a dłonie powinny swobodnie spoczywać na uchwytach. Po ustawieniu wysokości należy sprawdzić, czy mechanizm regulacji jest prawidłowo zablokowany po obu stronach.

Krok 3. Kontrola hamulców

Przed użyciem sprawdzić, czy hamulce działają prawidłowo i czy po ich zaciśnięciu koła zostają skutecznie zatrzymane. W przypadku nieprawidłowego działania hamulców nie należy korzystać z produktu.

5. Sposób użytkowania

Chodzenie z balkonikiem

- chwycić obie ręczki i przyjąć stabilną pozycję,
- powoli przesuwając balkonik przed sobą, zachowując kontrolę nad kierunkiem jazdy,
- unikać gwałtownych skrętów, szybkiego prowadzenia oraz przechyłania konstrukcji,
- nie wieszać ciężkich toreb na ręczkach, ponieważ może to zaburzyć stabilność balkonika.

Korzystanie z siedziska

Siedzisko przeznaczone jest do krótkiego odpoczynku. Przed siadaniem należy ustawić balkonik na równym podłożu, użyć hamulców i upewnić się, że produkt stoi stabilnie. Siadać należy powoli, trzymając się uchwytów lub oparcia.

Podpórka / podnózek na nogi

Podpórka na nogi służy do poprawy komfortu podczas odpoczynku w pozycji siedzącej. Nie należy stawiać na podpórce ani używać jej jako stopnia do wchodzenia na produkt.

Koszyk i uchwyt na napój

Koszyk przeznaczony jest do przenoszenia lekkich przedmiotów codziennego użytku. Uchwyt na napój, jeżeli występuje w danej konfiguracji, umożliwia wygodne umieszczenie butelki lub kubka. Nie należy przeciążać koszyka ani przewozić przedmiotów, które mogłyby zaburzyć stabilność balkonika.

6. Czynności przed każdym użyciem i zasady bezpieczeństwa

- sprawdzić, czy rama nie jest pęknięta, wygięta ani uszkodzona,
- sprawdzić, czy koła obracają się swobodnie i nie mają luzów,
- sprawdzić działanie hamulców oraz stabilność uchwytów,
- upewnić się, że wysokość ręczek została prawidłowo ustawiona i zablokowana,
- przed siadaniem zawsze zatrzymać balkonik i zablokować hamulce,
- sprawdzić, czy podpórka / podnózek na nogi jest stabilny i używany zgodnie z przeznaczeniem,
- nie przekraczać maksymalnego obciążenia użytkownika 75 kg,
- nie używać balkonika na schodach, schodach ruchomych, stromych zjazdach ani bardzo nierównym podłożu,
- nie używać produktu jako zamiennika wózka inwalidzkiego do przewożenia użytkownika na dłuższych dystansach.

Uwaga: w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek lub braków nie należy używać balkonika do czasu usunięcia problemu.

7. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Nazwa produktu	ORMIGO NEXA COMFORT
Typ produktu	Balkonik rehabilitacyjny czterokołowy / rollator
Marka	ORMIGO
Konstrukcja	Rama aluminiowa
Koła	4 koła, 6" PVC
Maksymalne obciążenie użytkownika	75 kg
Waga netto	ok. 7,3 kg
Siedzisko	Tak, do krótkiego odpoczynku
Koszyk	Tak
Uchwyt na napój	Tak / jeżeli występuje w danej konfiguracji
Podpórka / podnózek na nogi	Tak
Regulacja wysokości uchwytów	Tak
Hamulce	Hamulce przy ręczkach
Kolor	Niebieski / granatowy
Opakowanie	Karton

Zakres regulacji wysokości uchwytów i szczegółowe wymiary całkowite należy podać zgodnie z etykietą, kartą techniczną lub dokumentacją partii produktu.

8. Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie

Czyszczenie

- ramę, uchwyty, siedzisko, koszyk i podpórkę na nogi czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką,
- stosować łagodne środki myjące przeznaczone do powierzchni sprzętu medycznego,
- nie stosować agresywnych rozpuszczalników, środków ściernych ani nadmiernej ilości wody,
- po czyszczeniu osuszyć produkt przed ponownym użyciem.

Konserwacja

- regularnie kontrolować stan kół, hamulców, uchwytów, śrub i elementów regulacyjnych,
- w przypadku luzów lub uszkodzeń nie używać produktu do czasu sprawdzenia przez serwis lub osobę uprawnioną,
- nie dokonywać samodzielnych przeróbek konstrukcyjnych.

Przechowywanie i transport

Balkonik należy przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od nadmiernej wilgoci, źródeł ciepła i bezpośredniego działania promieni słonecznych. Podczas transportu produkt należy zabezpieczyć przed przesuwaniami i uszkodzeniem mechanicznym.

9. Uwagi, gwarancja i zgłaszanie incydentów

ORMIGO Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, samodzielnych przeróbek lub korzystania z uszkodzonego produktu.

Jeżeli użytkownik odczuwa nieoczekiwane dolegliwości, pogorszenie samopoczucia lub trudności z bezpiecznym korzystaniem z balkonika, należy przerwać użytkowanie i skonsultować się z lekarzem, fizjoterapeutą lub opiekunem.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent ma miejsce zamieszkania.

Produkt objęty jest gwarancją zgodnie z kartą gwarancyjną lub dokumentem sprzedaży. Do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu.

10. Informacja o wyrobie medycznym

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi użytkowania, regulacji, czyszczenia, konserwacji i bezpiecznego stosowania.

Informacja	Dane
Wyrób medyczny	Tak
Oznakowanie	CE
Przeznaczenie	Wsparcie mobilności osób z ograniczoną sprawnością ruchową

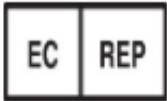
11. Dane producenta i podmiotu prowadzącego reklamę

Podmiot	Dane
Producent	ORMIGO Sp. z o.o. 68-200 Żary, ul. Broni Pancernej 16, Poland www.ormigo.com.pl e-mail: zamowienia@ormigo.com.pl

Podmiot	Dane
Podmiot prowadzący reklamę	ORMIGO Sp. z o.o. 68-200 Żary, ul. Broni Pancernej 16, Poland www.ormigo.com.pl e-mail: zamowienia@ormigo.com.pl

Dziękujemy za wybór ORMIGO! Całość oferty dostępna jest u naszych dystrybutorów oraz na stronie www.ormigo.com.pl.

❖ 9. Oznaczenia

	Numer partii		Zapoznaj się z instrukcją
	Importer		Upoważniony przedstawiciel
	Producent		Wyrób medyczny
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych		Data produkcji
	Maksymalne obciążenie		Kod UDI