

INSTRUKCJA UŻYWANIA

ORMIGO ORMI SUPPORT

Wielofunkcyjne manualne krzesło transferowo-toaletowe z funkcją podnoszenia pacjenta

MD wyrób medyczny	CE oznakowanie CE	100 kg maksymalne obciążenie
37-57 cm regulacja siedziska	TRANSFER łóżko / sofa / toaleta	MANUAL mechanizm podnoszenia



Regulowana wysokość | Pojemnik sanitarny | Podłokietniki | Podpórki na stopy | Koła z hamulcami


Producent: ORMIGO Sp. z o.o. | www.ormigo.com.pl | e-mail: zamowienia@ormigo.com.pl

1. Opis produktu

ORMIGO ORMI SUPPORT to wielofunkcyjne manualne krzesło transferowo-toaletowe z funkcją podnoszenia pacjenta. Produkt wspiera osoby z ograniczoną mobilnością podczas przesiadania, krótkiego przemieszczania wewnątrz pomieszczeń oraz wykonywania czynności higienicznych i toaletowych.

Krzesło może być wykorzystywane jako pomoc przy transferze pomiędzy łóżkiem, sofą, fotelem, wózkiem, toaletą lub stołem. Regulowana wysokość siedziska pozwala lepiej dopasować produkt do powierzchni, na którą użytkownik ma zostać przeniesiony.

2. Wykonanie i elementy

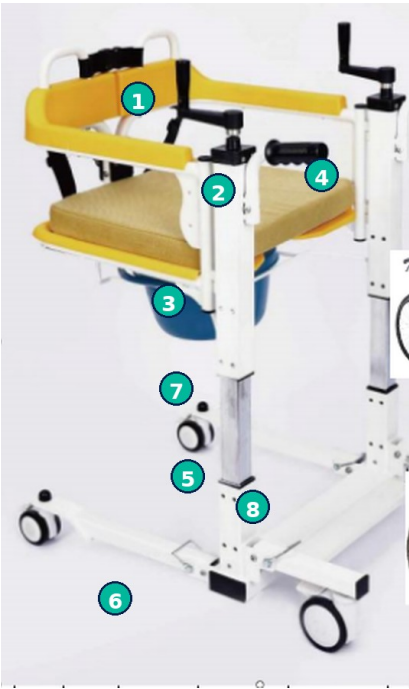

Nr	Element
1	Oparcie
2	Podłokietniki
3	Siedzisko
4	Manualny mechanizm podnoszenia / regulacji
5	Stalowa rama
6	Koła z hamulcami
7	Pojemnik sanitarny z pokrywą
8	Podpórki na stopy

3. Przeznaczenie

Produkt przeznaczony jest do wspierania użytkownika podczas codziennej opieki, w szczególności przy transferze, korzystaniu z funkcji toaletowej oraz krótkotrwałym przemieszczaniu wewnątrz pomieszczeń.

- transfer z łóżka, sofy, fotela lub wózka;
- wsparcie podczas korzystania z toalety;
- pomoc podczas czynności higienicznych i pielęgnacyjnych;
- opieka domowa nad osobami starszymi lub chorymi;
- zastosowanie w domach opieki, placówkach rehabilitacyjnych i medycznych.

4. Przeciwwskazania i ograniczenia użytkowania

- nie stosować u osób, których masa ciała przekracza 100 kg;
- nie używać na schodach, stromych pochyłościach ani nierównym podłożu;
- nie używać jako wózka transportowego do długich przejazdów;
- nie pozostawiać użytkownika bez nadzoru, jeżeli jego stan wymaga asekuracji;
- nie używać produktu w przypadku uszkodzenia ramy, kół, blokad, hamulców lub mechanizmu regulacji wysokości.

Uwaga: produkt powinien być używany wyłącznie zgodnie z instrukcją oraz po sprawdzeniu jego stabilności i kompletności.

5. Przygotowanie do użycia

Etap	Czynność
Krok 1. Kontrola po rozpakowaniu	Sprawdzić, czy produkt nie posiada widocznych uszkodzeń transportowych i czy wszystkie elementy są kompletne.
Krok 2. Ustawienie produktu	Ustawić krzesło na równym, stabilnym podłożu. Upewnić się, że koła mają kontakt z podłożem.
Krok 3. Blokada kół	Przed sadzaniem użytkownika zablokować koła hamulcami i sprawdzić stabilność krzesła.
Krok 4. Regulacja wysokości	Ustawić wysokość siedziska odpowiednio do łóżka, toalety, sofy lub innej powierzchni transferowej.
Krok 5. Kontrola zabezpieczeń	Sprawdzić, czy elementy blokujące, podłokietniki, siedzisko, podpórki na stopy oraz pojemnik sanitarny są prawidłowo zamocowane.

6. Regulacja wysokości i transfer

Manualny mechanizm podnoszenia umożliwia zmianę wysokości siedziska w zakresie 37-57 cm. Regulację należy wykonywać powoli, z zachowaniem kontroli nad użytkownikiem i po upewnieniu się, że krzesło stoi stabilnie.

- ustawić krzesło możliwie blisko powierzchni transferowej;
- zablokować koła przed przesiadaniem;
- asekurować użytkownika przez cały czas transferu;
- nie wykonywać gwałtownych ruchów podczas podnoszenia lub opuszczania siedziska;
- po zakończonej regulacji upewnić się, że mechanizm jest stabilny.

7. Zasady bezpieczeństwa

- przed każdym użyciem sprawdzić stan ramy, kół, hamulców, blokad i mechanizmu regulacji wysokości;
- przed transferem zawsze zablokować koła;
- nie przekraczać maksymalnego obciążenia 100 kg;
- nie stawać na podpórkach na stopy;
- nie używać produktu na mokrym, śliskim lub nierównym podłożu bez asekuracji;
- nie przewozić użytkownika po schodach, progach ani na zewnątrz po nierównym terenie;
- nie dokonywać samodzielnych przeróbek konstrukcyjnych;
- w razie uszkodzenia lub nietypowej pracy mechanizmu przerwać użytkowanie produktu.

Ostrzeżenie: jeżeli użytkownik nie jest w stanie samodzielnie utrzymać stabilnej pozycji siedzącej, produkt powinien być używany wyłącznie pod nadzorem opiekuna.

8. Funkcja toaletowa

Krzesło wyposażone jest w pojemnik sanitarny z pokrywą. Pojemnik należy opróżniać i czyścić po każdym użyciu. Przed skorzystaniem z funkcji toaletowej należy upewnić się, że pojemnik jest prawidłowo osadzony, a koła są zablokowane.

9. Czynności higieniczne

Produkt może wspierać czynności higieniczne i pielęgnacyjne. Po kontakcie z wodą lub wilgocią elementy produktu należy dokładnie osuszyć. Nie należy pozostawiać krzesła w środowisku wilgotnym przez dłuższy czas.

10. Czyszczenie, dezynfekcja i konserwacja

- czyścić produkt regularnie, szczególnie po użyciu funkcji toaletowej;
- siedzisko, oparcie i podłokietniki przecierać miękką, lekko wilgotną ściereczką;
- stosować łagodne środki myjące lub środki przeznaczone do powierzchni sprzętu medycznego;
- opróżniać i myć pojemnik sanitarny po każdym użyciu;
- nie stosować agresywnych rozpuszczalników, wybielaczy ani środków ściernych;
- regularnie kontrolować śruby, połączenia, hamulce, koła, elementy blokujące i mechanizm regulacji wysokości;
- po czyszczeniu dokładnie osuszyć produkt.

11. Przechowywanie i transport

Produkt należy przechowywać w suchym, czystym miejscu, zabezpieczonym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. Podczas transportu krzesło powinno być zabezpieczone przed przesuwaniem się i uderzeniami.

12. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Nazwa produktu	ORMIGO ORMI SUPPORT
Typ produktu	Wielofunkcyjne manualne krzesło transferowo-toaletowe z funkcją podnoszenia pacjenta
Materiał ramy	Stal węglowa
Szerokość całkowita	60 cm
Długość całkowita	71 cm
Wysokość całkowita	79-99 cm
Wysokość siedziska	37-57 cm
Szerokość siedziska	46 cm
Głębokość siedziska	40 cm
Wysokość oparcia	37 cm
Koła przednie / tylne	5" / 3"
Maksymalne obciążenie	100 kg
Masa netto	ok. 25,5 kg
Wymiary opakowania	62 x 37 x 72 cm

13. Informacja o wyrobie medycznym

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi użytkowania, regulacji, czyszczenia, konserwacji i bezpiecznego stosowania.

Informacja	Dane
Wyrób medyczny	Tak
Oznakowanie	CE
Przeznaczenie	Wsparcie transferu, opieki i czynności toaletowych osób z ograniczoną mobilnością

14. Dane producenta i podmiotu prowadzącego reklamę

Podmiot	Dane
Producent	ORMIGO Sp. z o.o. 68-200 Żary, ul. Broni Pancernej 16, Poland www.ormigo.com.pl e-mail: zamowienia@ormigo.com.pl
Podmiot prowadzący reklamę	ORMIGO Sp. z o.o. 68-200 Żary, ul. Broni Pancernej 16, Poland www.ormigo.com.pl e-mail: zamowienia@ormigo.com.pl

MD CE

15. Oznaczenia

Na etykiecie, opakowaniu lub w dokumentacji wyrobu mogą występować poniższe symbole i oznaczenia.

LOT	Numer partii	[i]	Zapoznaj się z instrukcją
IMP	Importer	EC REP	Upoważniony przedstawiciel
///	Producent	MD	Wyrób medyczny
CE	Producent dokonał oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi dotyczącymi wyróbów medycznych	YYYY-MM	Data produkcji
kg	Maksymalne obciążenie	UDI	Kod UDI

Dziękujemy za wybór ORMIGO!